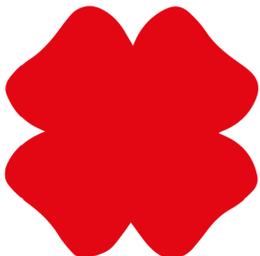


Pantone 5415

Hergestellt von:


**optimum**medical®

Vertrieb in Deutschland:


**AUROSAN**

 Optimum Medical Solutions Ltd  
 Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds,  
 LS2 9ET, United Kingdom,  
 Tel.: +44 (0) 8456 435 479  
 enquiries@optimummedical.co.uk  
 www.optimummedical.co.uk




leg bag straps

REF 3011

## Ugo Fix - Beinbeutelriemen

Wir bei **Optimum Medical** sind uns Ihrem Bedürfnis nach Sicherheit, zuverlässiger Fixierung und Unterstützung für Ihren Katheter und Beinbeutel bewusst. Die **Ugo Fix Leg Bag Straps (Ugo Fix - Beinbeutelriemen)** unterstützen Ihren **Ugo Leg Bag (Ugo - Beinbeutel)**. Sie sind dafür vorgesehen, Ihren **Ugo Leg Bag (Ugo - Beinbeutel)** an Ihrem Oberschenkel, dem oberen Knie oder dem Schienbein zu fixieren und können zudem für **Ugo Leg Bags (Ugo - Beinbeutel)** jeder Größe genutzt werden. Die **Ugo Fix Leg Bag Straps** werden im Paar geliefert, ein Riemen ist 75 cm und der andere 45 cm lang. Beide Riemen sind vollständig anpassbar und können, falls nötig, zugeschnitten werden. Die **Ugo Fix Leg Bag Straps (Ugo Fix - Beinbeutelriemen)** sind waschbar und wiederverwendbar. Bitte befolgen Sie die vorliegende Waschanleitung.

### GEBRAUCHSANWEISUNG


Es ist wichtig, dass Sie Ihren Katheter oder Ihren Beinbeutel nicht ungestützt herunterhängen lassen, da dies Beschwerden hervorrufen kann. Unterstützen Sie stets das Gewicht Ihres Beinbeutels, wenn Sie die **Ugo Fix Leg Bag Straps (Ugo Fix - Beinbeutelriemen)** anpassen.

### ANPASSOPTIONEN

#### METHODE A

Nutzen Sie beide Riemen, um Ihren Ugo Leg Bag (Ugo - Beinbeutel) an Ihrem Oberschenkel oder Schienbein zu befestigen.

- Fädeln Sie den langen Ugo Fix Leg Bag Strap (Ugo - Beinbeutelriemen) (75 cm) durch die 4 Löcher oben auf Ihrem Ugo Leg Bag (Ugo - Beinbeutel) und den kurzen Ugo Fix Leg Bag Strap (Ugo - Beinbeutelriemen) (45 cm) durch die 2 unteren Löcher.
  - Achten Sie darauf, dass die Silikonleitung Ihrer Haut zugewandt ist.

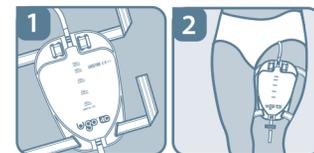

- Befestigen Sie die Riemen in der gewünschten Position an Ihrem Oberschenkel oder Schienbein und nutzen Sie die Klettverschlüsse, um sie zu fixieren (es ist in der Regel einfacher, zuerst den oberen Riemen anzubringen).
  - Gewährleisten Sie, dass Ihr Ugo Leg Bag (Ugo - Beinbeutel) unterstützt wird und dass Sie sich mit dem befestigten Beutel bequem bewegen können.

#### METHODE B

Nutzen Sie den langen Riemen, um den Ugo Leg Bag (Ugo - Beinbeutel) an Ihrem oberen Knie zu befestigen.

- Fädeln Sie den langen Ugo Fix Leg Bag Strap (Ugo - Beinbeutelriemen) (75 cm) durch die 4 Löcher oben auf Ihrem Ugo Leg Bag (Ugo - Beinbeutel).
- Nehmen Sie beide Enden des Ugo Fix Leg Bag Straps (Ugo - Beinbeutelriemens) und führen Sie sie um Ihren Oberschenkel über Ihrem Knie herum. Überkreuzen Sie die Riemen in der Kniekehle.
- Bewegen Sie die beiden Enden der Riemen zur Vorderseite Ihres Beins, fädeln Sie sie durch die 2 unteren Löcher Ihres Ugo Leg Bags (Ugo - Beinbeutels) und befestigen Sie die Vorrichtung mit dem Klettverschluss hinter dem Beutel.
  - Gewährleisten Sie, dass Ihr Ugo Leg Bag (Ugo - Beinbeutel) unterstützt wird und dass Sie sich mit dem befestigten Beutel bequem bewegen können.



**WARNHINWEIS:**  
Von Kindern fernhalten!

